

Benutzerkarte



Lesen Sie die Anweisungen auf dieser Karte vollständig durch, bevor Sie den OSAsense S18 verwenden.

Was brauchen Sie?

- ① der OSAsense S18
- ② der Sensor

①



②



1 Fragebogen

Gehen Sie auf www.osasense.com/login und loggen Sie sich mit Ihrer Handynummer. Sie erhalten einen Code per SMS.

Oder

Befolgen Sie die Anweisungen in die E-Mail, die Sie von OSAsense erhalten haben.

Füllen Sie den Fragebogen aus.

Sobald Sie schlafen gehen, fahren Sie mit Schritt 2 fort.

2 OSAsense S18

Siehe die Anleitung auf: www.osasense.com/video

Schließen Sie die OSAsense S18 ① an Ihr linkes Handgelenk an (siehe Foto Schritt 6), nehmen Sie den Sensor ② aus der Verpackung und entfernen Sie die Schutzfolie vom Sensor.

3 Sensor

Legen Sie Ihren linken Zeige- oder Ringfinger auf den Sensor ② (siehe Foto). Dann drücken Sie die Flügel gegen die Seiten Ihres Fingers.



Die Anweisungen gehen auf der Rückseite weiter.



4 Befestigen

Falten Sie den Sensor ② über Ihren Finger.
Drücke die Flügel gegen deinen Finger.

5 Überprüfen


Stellen Sie sicher, dass der Sensor ② den Finger berührt.

Vergewissern Sie sich, dass sich der Sensor ② direkt am Finger befindet.




6 Anschließen

Schließen Sie den sensor ② an die OSAsense S18 ① an.

Berühren Sie das  - Symbol, bis sich der Bildschirm einschaltet.
Das Gerät startet jetzt.



7 Schlafen

Behalten Sie den OSAsense S18 ① und den Sensor ② die ganze Nacht an, auch wenn Sie Z. zur Toilette gehen. Stellen Sie sicher, dass der S18 ① nicht nass wird. Wenn das Licht vom Sensor ② zu hell ist, können Sie ein Pflaster oder medizinisches Klebeband darüber legen. Das Display des S18 ① kann durch Berühren des  - Symbols ein- oder ausgeschaltet werden. Sie können jetzt schlafen gehen.

8 Abschluss der Untersuchung

Ziehen Sie den Steckers des Sensor am Morgen aus die OSAsense S18. Geben Sie die OSAsense S18 und den Sensor an Ihren Arzt zurück.

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt